



凝血酶原时间 (PT)

(凝固法)


临床意义

- 外源性凝血系统较理想和常用的筛选试验。
- 外源性途径及共同途径凝血因子的定量试验。
- 口服抗凝剂治疗的监控。


产品特点

- 液体试剂，开瓶即用，操作方便。
- 批间差小，精密度&稳定性卓越。
- 抗干扰能力强，受狼疮抗凝物及肝素影响小。


保存稳定性

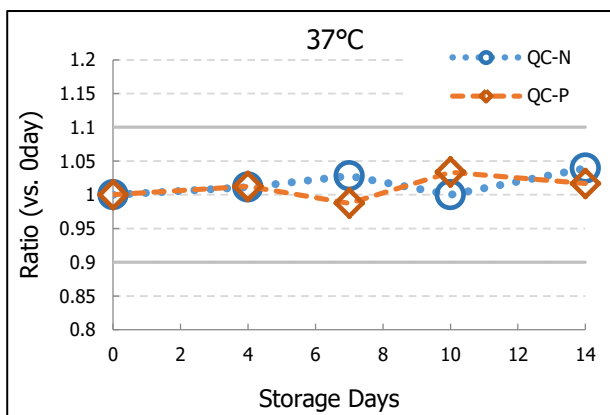


开瓶稳定性

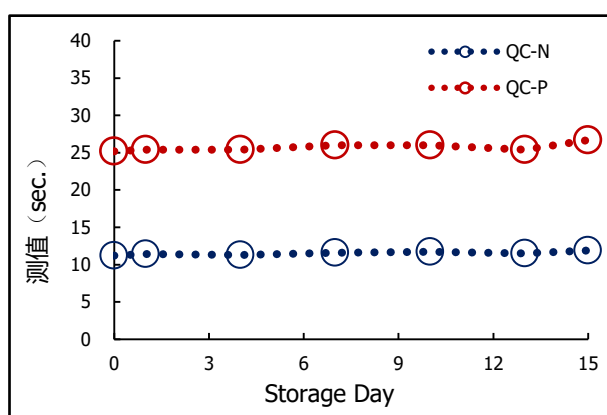

INR相关性

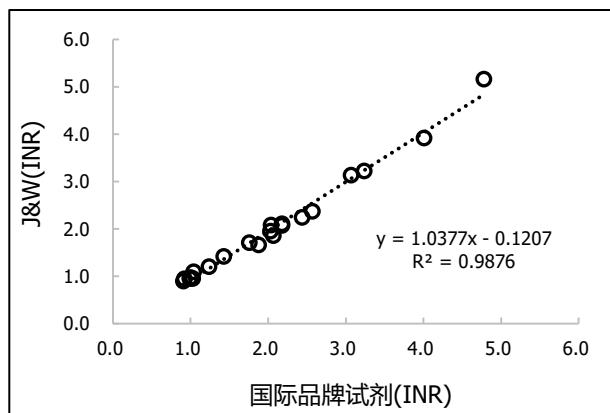

测值相关性

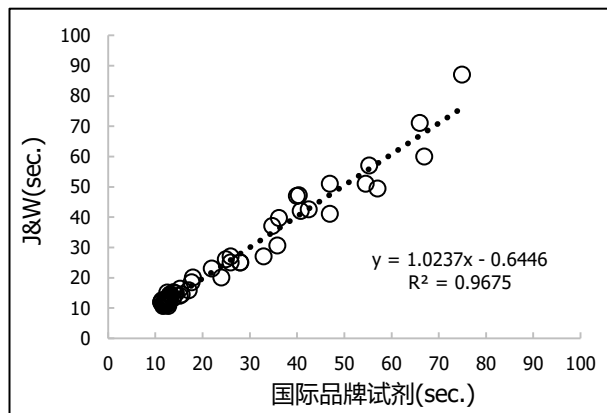



活化部分凝血活酶时间激活试剂 (APTT)

(凝固法)

临床意义

- 用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在相应的抑制物。
- 检测凝血因子Ⅻ、激肽释放酶原和高分子量激肽释放酶原是否缺乏。
- 监测普通肝素的首选指标。

产品特点

- 液体试剂，使用简单，免去复溶操作步骤。
- 稳定性好，开盖后可稳定使用15天。
- 提供匹配质控物质，保证准确性。


精密度

NO.	正常质控	异常质控
1	27.9	47.9
2	28.2	48.1
3	28.1	47.9
4	28.1	47.9
5	28.2	48.1
6	28.1	47.3
7	28.1	48
8	28.0	48.2
9	28.1	48
10	28.1	48.1
AV	28.1	47.95
SD	0.09	0.25
CV	0.31%	0.52%


批间差

NO.	第一批试剂	第二批试剂	第三批试剂
1	27.6	28.5	28.2
2	28.2	27.8	28.5
3	28.1	28.3	29.1
4	27.8	28.4	29.3
5	28.2	28.2	28.1
6	28.1	28.2	28.8
7	28.7	28	28.3
8	28	28.8	28.6
9	28.1	29	28.4
10	27.5	28.1	28.7
AV		28.32	
SD		0.42	
CV		1.49%	


效期稳定性

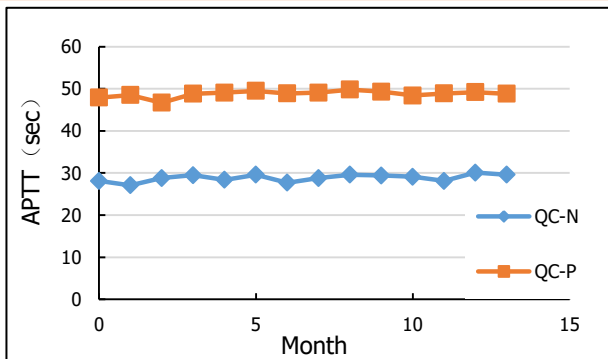


开瓶稳定性

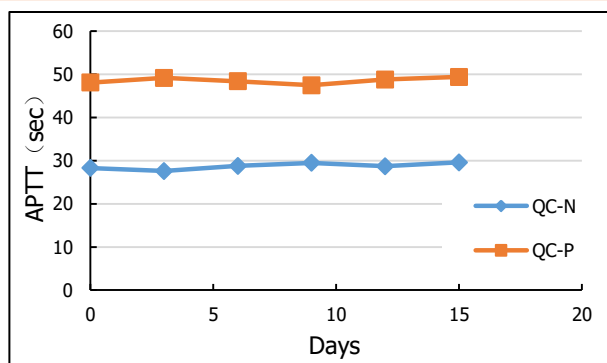

相关性

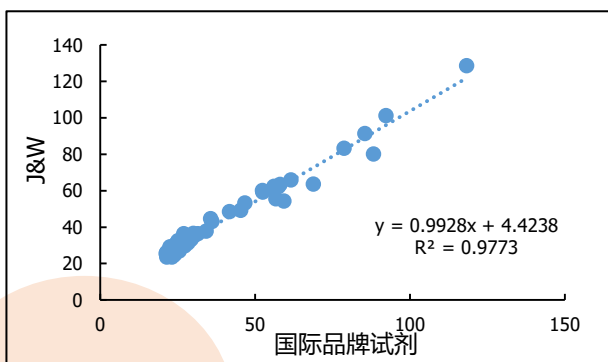

肝素敏感性

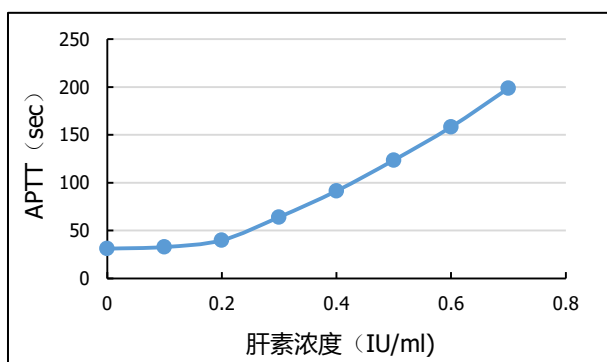

捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



纤维蛋白原 (FIB)

(凝固法)


临床意义

- 测定血浆纤维蛋白原有助于了解凝血机能状态。
- FIB含量增高：见于糖尿病及其酸中毒，动脉粥样硬化，急性传染病、急性肾炎尿毒症，休克，外科术后及轻度肝炎等。
- FIB含量减低：见于DIC，原发性纤溶症，重症肝炎，肝硬化。


产品特点

- 液体试剂，线性范围0.8-8.0g/L。
- 提供匹配校准和质控物质，保证准确性。
- 与国际品牌试剂具有高相关性。


线性

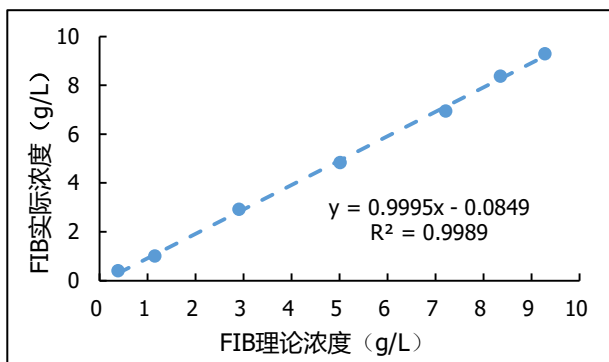


相关性

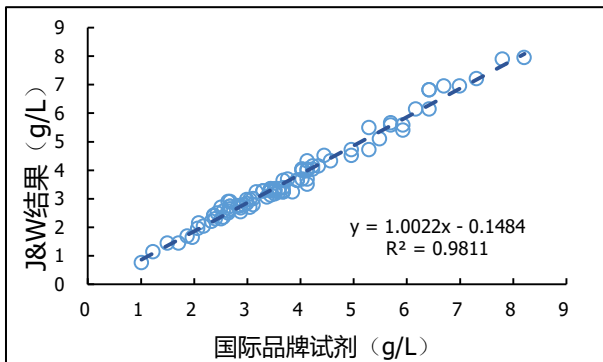


开瓶稳定性

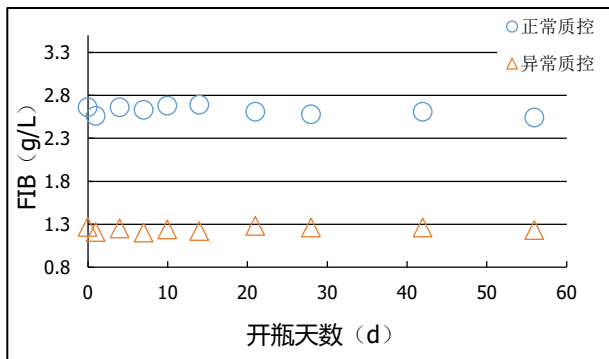

保存稳定性

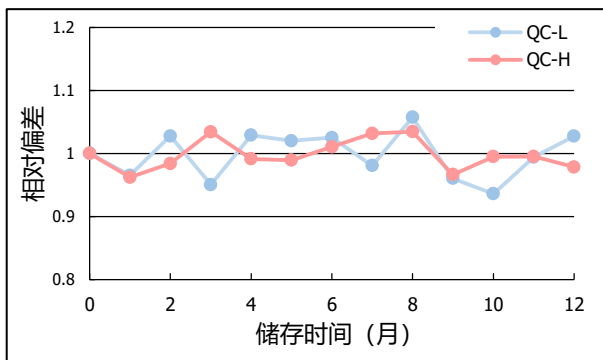

抗肝素干扰

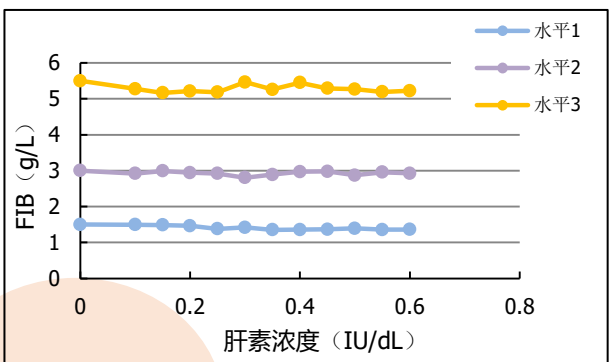

捷和泰 (北京) 生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号



凝血酶时间 (TT)

(凝固法)


临床意义

- 肝素及溶纤治疗的监测。
- 纤维蛋白结构异常或纤维蛋白原严重缺乏疾病的初筛。


产品特点

- 液体试剂，开瓶即用，操作方便。
- 批间差小，精密度&稳定性卓越。
- 对肝素治疗的控制高度敏感。


保存稳定性

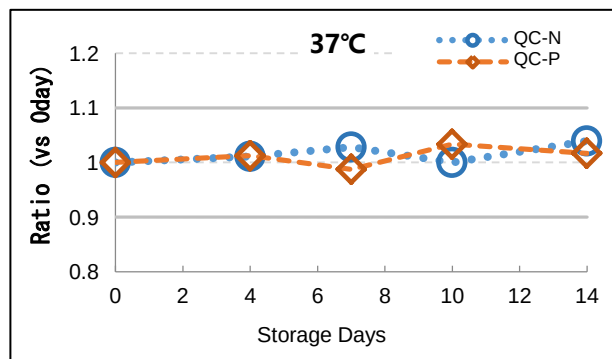


开瓶稳定性

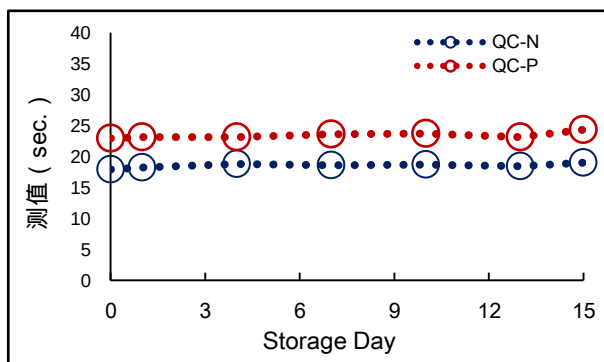

抗干扰能力

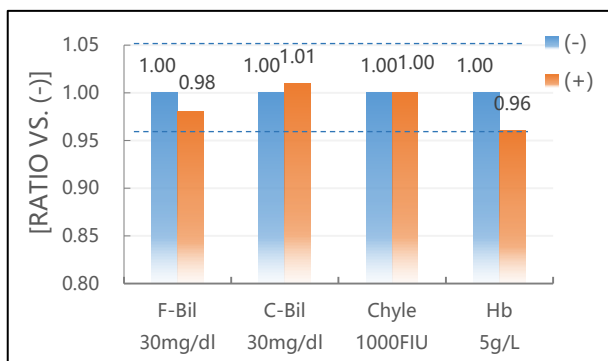

测值相关性

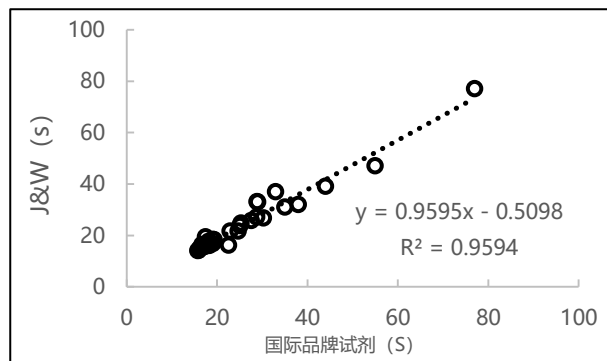



抗凝血酶III (AT III)

(发色底物法)


临床意义

- AT III合成减少或消耗增加引起的血栓性疾病。
- 升高:见于血友病、白血病、贫血以及口服抗凝药物的治疗过程中。
- 降低:DIC、肝疾患、肾病综合症等。


产品特点

- 可根据使用比例、冻干or液体, 定制试剂
- 已实现比例5: 1、4: 1、1: 1
- 液体双试剂, 线性范围 10%-150%。
- 提供配套校准和质控物质, 保证准确性。
- 不受样本中乳糜、胆红素等干扰物质影响, 测定准确。


线性

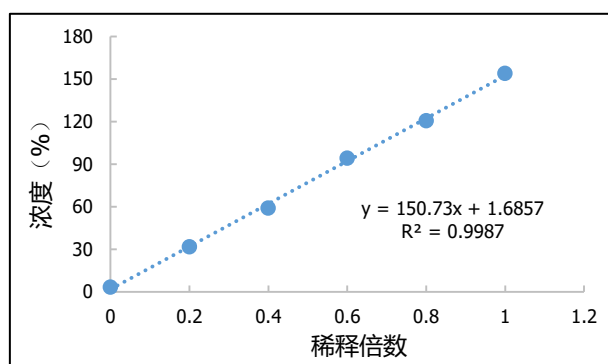


试剂对比

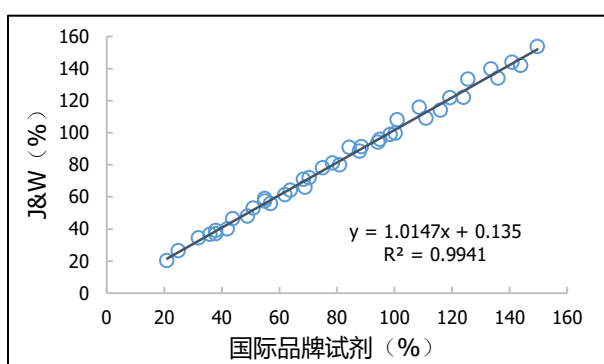

开瓶稳定性

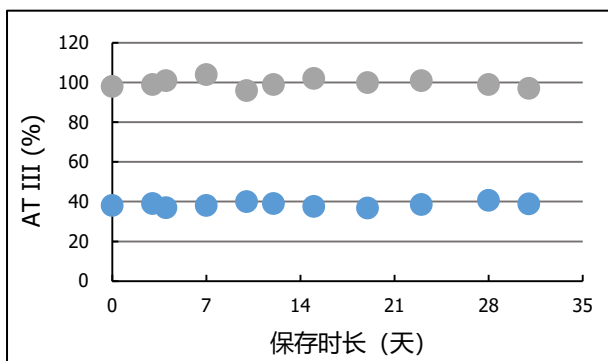

效期稳定性

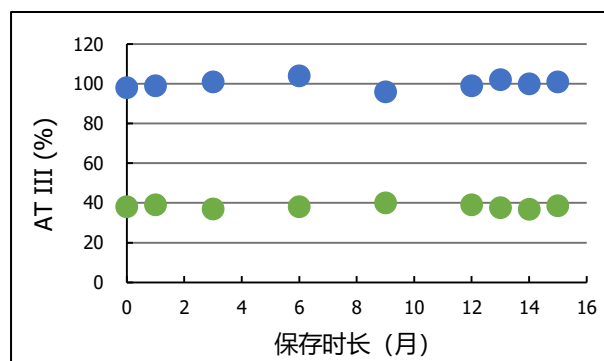

捷和泰(北京)生物科技有限公司

电话: 010-59528900 地址: 北京市昌平区科学园路31号